

Ehkäisevä huuliherpesvoide päivittäiseen käyttöön



SoreFix Ehkäisevä -huuliherpesvoide sopii päivittäiseen käyttöön. Voide ehkäisee huuliherpeksen puhkeamista tilanteissa, joissa huuliherpes (*herpes simplex*) saattaa aktivoitua uudelleen. Voide muodostaa huulille kalvon, joka suojaa niitä huuliherpestä laukaisevita tekijöiltä (huuliherpestä laukaisevia tekijöitä on esitetty kuvassa "All phases technology"). SoreFix Ehkäisevä -voiteen aurinkosuojakerroin 30 antaa huulille optimaalisen suojan ja ehkäisee UV-säteilyn laukaiseman huuliherpeksen uusiutumista. Huuliherpesvoide parantaa huulten kuntoa.

Annostus ja käyttö:


Huuliherpeksen ennaltaehkäisemiseksi levitä SoreFix Ehkäisevä -huuliherpesvoidetta 3–6 kertaa päivässä kaikkialle huuliin, kun altistut huuliherpestä aktivoisille tekijöille (ks. kuva "All phases technology"). Pese kädet huolellisesti ennen voiteen levittämistä ja sen jälkeen. Jos käytät huulipunaa, levitä SoreFix Ehkäisevä -voide vähintään 15 minuuttia ennen huulipunaa.

Käyttöön liittyvät varoitusmerkit:

- Tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön huulille ja huulten ympärille.
- Älä käytä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin valmisteen ainesosalle. Lopeta käyttö välittömästi, jos sinulla ilmenee ärsytystä tai allerginen reaktio. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos oireet jatkuvat.
- Jos olet raskaana tai imetät, voit käyttää valmistetta vain terveydenhuollon ammattilaisen seurannassa ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti.
- Sopii aikuisille ja vähintään 4-vuotiaille lapsille.
- 30 päivän yhtäjaksoisen käytön jälkeen on suositeltavaa pitää käytössä 2 päivän tauko.

Jos tuotteen käyttöön on liittynyt vakava vaaratilanne, ilmoita siitä käyttöohjeessa mainitulle valmistajalle ja oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

MITEN SOREFIX VAIKUTTAA HUULIHERPEKSEN ERI VAIHEISSA?

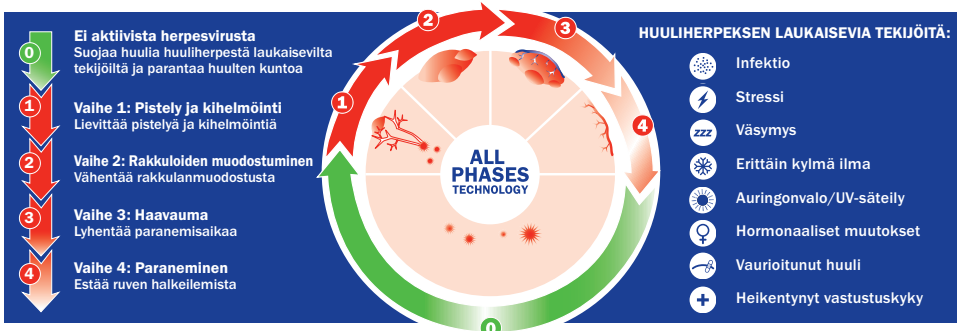

Ingredients:

Jojoba öljy (56%), PEG-8 beeswax, ethylhexyl methoxycinnamate (8%), octocrylene (6%), hydrogenated styrene/isoprene copolymer, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (3%), zinc oxide (2.2%), zinc ricinoleate, parfum, aluminum starch octenylsuccinate, tocopheryl acetate, butyrospermum parkii (shea) butter, hydrogenated styrene/butadiene copolymer, pomegranate oil, triethoxycaprylylsilane.

LOT Eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä: ks. kotelo ja voidepurkki
Hoidon päätyttyä hävitä purkki, käyttöohje ja kotelo tavallisen talousjätteen kanssa. Ajattele ympäristöä ja kierrätä.

U Yhdelle käyttäjälle useaa käyttökertaa varten

MD Lääkinnällinen laite

UV Säilytä purkki auringonvalolta suojattuna.



Ei lasten ulottuville.

Saatavilla myös:

- SoreFix Hoitava -huuliherpesvoide



Lisätietoja osoitteesta: www.sorefix.com/fi

Jakelija
Sirowa Finland Ltd Oy
Miestentie 9 C
02150 Espoo
Suomi/Finland
+358 40 550 2662
fi.pharma@sirowa.com

Valmistaja
Serrix BV
Herengracht 458,
1017 CA, Amsterdam
Alankomaat



Prevent Förebyggande munsårsbalsam för dagligt bruk



SoreFix Prevent munsårsbalsam kan användas dagligen för att förebygga ett munsårsutbrott i situationer där det finns en ökad risk för att munsårsviruset (herpes simplex-viruset) återaktiveras. Balsamet bildar en fysisk barriär som skyddar läpparna mot faktorer som kan utlösa munsår (se faktorer som kan utlösa munsår i bilden "All phases technology"). SoreFix Prevent innehåller solskyddsfaktor (SPF 30) som ger ett optimalt skydd för läpparna och förebygger återfall av munsår som orsakas av UV-strålning. Munsårsbalsamet vårdar läpparna.

Dosering och bruk:


För att förebygga munsår applicera SoreFix Prevent munsårsbalsam 3–6 gånger dagligen på läpparna då du är utsatt för omständigheter som utlöser munsår (se bilden "All phases technology"). Det är rekommenderat att tvätta händerna före och efter applicering. När du använder läppstift, applicera SoreFix Prevent munsårsbalsam minst 15 minuter före läppstiftet.

Försiktighetsåtgärder:

- Endast lämplig för utvärtes bruk på och runt läpparna.
- Använd inte om du är allergisk eller överkänslig mot något av innehållsämna. Avbryt användningen omedelbart om irritation eller allergisk reaktion uppstår. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår.
- Under graviditet och amning ska produkten endast användas enligt anvisningar och under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal.
- Lämpar sig för vuxna och barn från 4 års ålder.
- Efter 30 dagars kontinuerlig användning är det rekommenderat att hålla en 2 dagar lång paus i användningen.

Om ett allvarligt tillbud har inträffat ska du rapportera om det till tillverkaren som anges i bruksanvisningen och den behöriga myndigheten i ditt land.

VAD GÖR SOREFIX I DE OLIKA FASERNA AV MUNSÅRET?

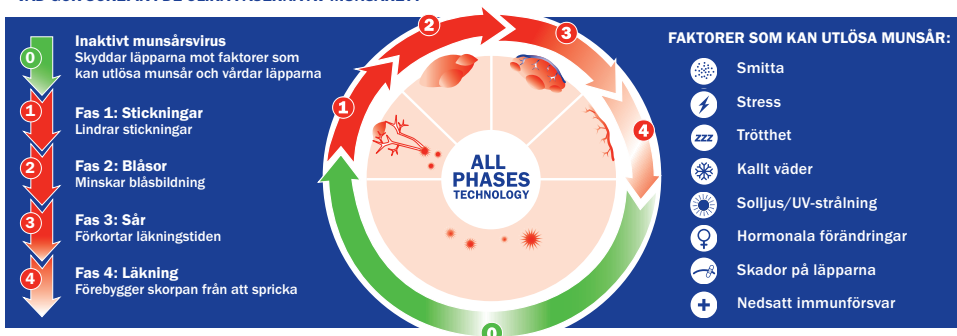

Ingredients:

Jojoba oil (56%), PEG-8 beeswax, ethylhexyl methoxycinnamate (8%), octocrylene (6%), hydrogenated styrene/isoprene copolymer, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (3%), zinc oxide (2.2%), zinc ricinoleate, parfum, aluminum starch octenylsuccinate, tocopheryl acetate, butyrospermum parkii (shea) butter, hydrogenated styrene/butadiene copolymer, pomegranate oil, triethoxycaprylylsilane.

LOT Batchnummer och utgångsdatum: se förpackningen och burken När du slutat behandlingen kasta burken, bruksanvisningen och kartongen bland vanligt hushållsavfall. Tänk på miljön och återvinn.

1P En patient, flera användningsgångar

MD Medicinteknisk produkt

UV Förvara burken i skydd mot solljus.

15°C Förvara oåtkomligt för barn.

Även följande finns tillgängliga:

- SoreFix Rescue munsårskräm



Mer information finns på: www.sorefix.com/fi

Distributör
Sirowa Finland Ltd Oy
Miestentie 9 C
02150 Espoo
Suomi/Finland
☎ +358 40 550 2662
fi.pharma@sirowa.com

Tillverkare
Serrix BV
Herengracht 458
1017 CA, Amsterdam
Nederländerna

