

soreFix®

Πείτε αντίο στον έρπη, χαμογελάστε ελεύθερα

Ενεργό Επίθεμα

Duo Patch

Επίθεμα επιχείλιου έρπη με 0,5% υαλουρονικό οξύ

- Βοηθάει στην επούλωση και ανακουφίζει από τον κνησμό
- Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης
- Διαφανές, υποαλλεργικό, ανθεκτικό στο μακιγιάζ
- Δρα αποτελεσματικά για 12 ώρες

Το **SoreFix Duo Patch** είναι ένα εξαιρετικά λεπτό, διαφανές, υποαλλεργικό επίθεμα που προσκολλάται στα χείλη. Το επίθεμα περιέχει υαλουρονικό οξύ, το οποίο ενυδατώνει επαρκώς τον επιχείλιο έρπη. Αυτό βοηθάει στην ανάρρωση από τον επιχείλιο έρπη, ανακουφίζει από τον κνησμό, δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα ενάντια στις εξωτερικές επιδράσεις, μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης και αποτρέπει τη δημιουργία ουλών. Το επίθεμα είναι αποτελεσματικό για περίπου 12 ώρες, είναι διακριτικό και μπορεί να εφαρμοστεί μακιγιάζ πάνω από αυτό.

Τι είναι ο επιχείλιος έρπης;

Ο επιχείλιος έρπης είναι μία μόλυνση που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα και εμφανίζεται με τη μορφή φουσκάλας (φλύκταινας) πάνω στο χείλος. Αυτές οι φουσκάλες (φλύκταινες) περιέχουν υγρό και αποτελούν τον επιχείλιο έρπη.

Ποια είναι τα συμπτώματα της μόλυνσης από επιχείλιο έρπη;

Τα πρώτα συμπτώματα είναι η αίσθηση καύσου και μουδιάσματος στα χείλη και η ερυθρότητα. Οι φουσκάλες που περιέχουν υγρό σχηματίζονται μέσα σε λίγες ώρες. Ο επιχείλιος έρπης μπορεί να ενεργοποιηθεί από εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πυρετό, εμμηνόρροια, άγχος, έκθεση σε έντονο ηλιακό φως ή αντίδραση σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Ο επιχείλιος έρπης μπορεί πάντα να επανεμφανιστεί, καθώς ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω.

Τι να αποφεύγετε όταν έχετε επιχείλιο έρπη;

Εάν έχετε επιχείλιο έρπη, αποφύγετε την επαφή των χειλιών με άλλα άτομα μέχρι οι φουσκάλες (φλύκταινες) να εξαφανιστούν τελείως. Ο επιχείλιος έρπης είναι εξαιρετικά μεταδοτικός! Αποφύγετε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα φαγητά, καθώς αυτά μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Πώς δρα το SoreFix Duo Patch;

Η μαλακή πλευρά του επιθέματος καλύπτεται με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο επίστρωμα, στο οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα το υαλουρονικό οξύ. Το υαλουρονικό οξύ έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας κάτω από το επίθεμα ένα ενυδατωμένο περιβάλλον, που βοηθάει στην επούλωση της πληγής για 12 ώρες και ανακουφίζει από τον κνησμό. Το επίθεμα δημιουργεί παράλληλα ένα προστατευτικό στρώμα στο δέρμα έναντι εξωτερικών επιδράσεων, ενώ μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης και προστατεύει το δέρμα από ουλές.



**Χρήση (βλ. εικόνες):**

Πλύνετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το επίθεμα και βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι καθαρό και στεγνό. Ανοίξτε τη συσκευασία **1**, πιάστε το απλικατέρ από την ανάποδη πλευρά του επιθέματος μεταξύ αντίχειρα και δείκτη **2** και μετά βγάλτε από τη συσκευασία το απλικατέρ με το επίθεμα **3**. Τοποθετήστε πρώτα το μισό μέρος του επιθέματος στην περιοχή του επιχείλιου έρπητα **4** και στη συνέχεια με το άλλο μισό μέρος καλύψτε όλη την περιοχή **5**. Εάν είναι απαραίτητο, το μακιγιάζ και το κραγιόν μπορούν να εφαρμοστούν πάνω από το επίθεμα. Επαναλάβετε τη θεραπεία, μέχρι ο επιχείλιος έρπης να εξαφανιστεί πλήρως. Για μία μόνο χρήση.

**Προειδοποίηση:**

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων, αναφέρετέ τα στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

Περιέχει: 15 ενεργά επίθεματα

Τα προϊόντα SoreFix αντιμετωπίζουν τον επιχείλιο έρπη και τα στοματικά έλκη και βοηθούν στην πρόληψη των εξάρσεων του επιχείλιου έρπητα. Πείτε αντίο στον έρπη, χαμογελάστε ελεύθερα.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.sorefix.gr

**Ένα προϊόν της Serrix B.V.:**

Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Ολλανδία

**Διανομέας:**

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ
Μ.Α.Ε.Β.Ε.

Αρκαδίας 1 &
Μεγαλουπόλεως,
14564 Κηφισιά
+30 210 6208372

contact@pharmaservehellas.gr



Eurosirel SpA
Viale Europa, 30
Cusago 20047
Milano – Ιταλία



L214GR101