

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u SoreFix Prevent koortslip balsem toepast, ook als u dit product al eerder heeft gebruikt. De informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van nieuwe onderzoeks-resultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Prevent



SoreFix Prevent koortslip balsem kan dagelijks gebruikt worden. Het voorkomt een koortslip doordat het een fysieke barrière vormt die de lippen beschermt tegen invloeden van buitenaf (zie koortslip triggers in de blauwe balk). Daarnaast bevat SoreFix Prevent een UV-filter (SPF 30) waarmee koortslip uitbaken, veroorzaakt door UV-licht, voorkomen kunnen worden. De koortslip balsem is rijk aan natuurlijke oliën en vitamine E om de conditie van de lippen te verbeteren.

Dosering en gebruik

Ter voorkoming van een koortslip brengt u SoreFix Prevent koortslip balsem dagelijks 3 tot 6 maal aan op de gehele lip, of vaker wanneer u blootgesteld bent aan één van de triggers. Het wordt aanbevolen uw handen te wassen voor het aanbrengen van de balsem. Bij gebruik van lipstick wordt geadviseerd om SoreFix Prevent koortslip balsem minimaal 15 minuten van tevoren aan te brengen.

SoreFix Prevent koortslijs balsem is vrij van sulfaten, vrije polyethyleen glycolen, TEA's, DEA's, parabenen en andere conserveringsmiddelen.


Waarschuwingen voor gebruik

- SoreFix Prevent koortslip balsem is uitsluitend geschikt voor uitsluitend gebruik op en rond de lippen.
- Gebruik SoreFix Prevent koortslip balsem niet in geval van overgevoeligheid voor één of meer van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer SoreFix Prevent koortslip balsem irritatie of een allergische reactie veroorzaakt. Indien de symptomen aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.
- Gebruik SoreFix Prevent koortslip balsem tijdens de zwangerschap alleen na aanbeveling en onder begeleiding van een arts. SoreFix Prevent koortslip balsem kan tijdens borstvoeding worden gebruikt.
- SoreFix Prevent koortslip balsem is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.

Bijwerkingen

SoreFix Prevent koortslijp balsem wordt over het algemeen goed verdragen en er zijn geen bijwerkingen bekend.

WAT DOET SOREFIX IN ALLE FASES VAN EEN KOORTSLIP?

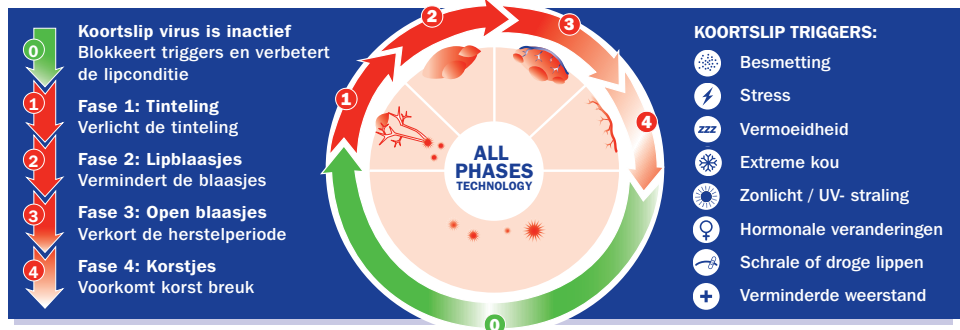

Ingrediënten

Simmondsia chinensis (Jojoba) zaadolie, PEG-8 bijenwas, Ethylhexyl methoxycinnamaat, Octocrylene, Ethyleen/propyleen/styreen copolymer, Diethylalumi hydroxybenzoyl hexyl benzoaat, Zinkoxide, Zinkricinolaeaat, Parfum, Zetmeel-aluminiumocterylsuccinaat, Tocoferylacetate (vitamine E), Butyrospermum parkii (sheaboter), Butyleen/ethyleen/propyleen copolymer, Punica granatum (granaatappel) zaadolie, Tri-ethoxycaprlylsilaan. BHT.

Ga voor meer informatie naar www.sorefix.nl



Lot nummer en vervaldatum: zie doosje en potje.



Medisch hulpmiddel:
SoreFix® Prevent koortslijp balsem is een gecertificeerd Klasse IIa medisch hulpmiddel.



Buiten bereik van kinderen houden. SoreFix Prevent koortslijp halsem kan tot 12 maanden na opening gebruikt worden

Laatste update gebruiksaanwijzing: September 2016

Koortslip behandelen

Om een koortslip te behandelen kunt u SoreFix Rescue koortslipcrème gebruiken. SoreFix Rescue koortslipcrème is een transparante crème met een bewezen effectiviteit in alle 4 de fases van een koortslip. SoreFix Rescue koortslipcrème verlicht de tinteling, vermindert de lipblaasjes, verkort de duur van de uitbraak en voorkomt het breken van de korstjes.



Distributeur: Teva Nederland BV
Swensweg 5, 2031 GA
Haarlem, Nederland
 0800-0228400
customerservice@tevanederland.com

 Serrix BV
Herengracht 458, 1017 CA
Amsterdam, Nederland



L014NL104
97.709.825-A