



Aften zijn oppervlakkige beschadigingen van het mondslijmvlies die het weefsel van de mond beschadigen, waardoor het onderliggende bindweefsel bloot komt te liggen en daardoor ongemak en pijn veroorzaken.

Aften komen regelmatig voor en hebben een gemiddelde genezingsijd van enkele dagen.

De oorzaak van aften is niet altijd bekend, maar kunnen ontstaan door verschillende factoren zoals sommige voedingsmiddelen, medicijnen, stress of hormonale veranderingen. Kleine wondjes in de mond kunnen ook te wijten zijn aan tandprothesen, orthodontische hulpmiddelen of bijten op het mondslijmvlies.

SoreFix Aften Plus is een gel voor de behandeling van aften en kleine beschadigingen van het mondslijmvlies. De gel vormt een barrière die de wond beschermt tegen pijn, branderig gevoel en ongemak dat optreedt als gevolg van eten en drinken. Vermindert pijn en branderig gevoel al na een minuut na het aanbrengen. De beschermende barrière vermindert pijn en branderig gevoel in een minuut na het aanbrengen en bevordert genezing. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

METAAL GETEST

Nikkel < 0,1 ppm
Chroom < 0,1 ppm
Kobalt < 0,1 ppm

Suikervrij

Glutenvrij

van nature lactosevrij

Gebruiksaanwijzing

Breng een kleine hoeveelheid SoreFix Aften Plus aan op het wondje met behulp van de applicator en bedek het hele te behandelen gebied. Wacht enkele seconden en raak het product niet zodat de gel een beschermende laag met barrière effect vormt.

Bevordering herstel

Breng de gel meerdere malen per dag aan tot het wondje volledig hersteld is. SoreFix Aften Plus kun je opnieuw aanbrengen zonder het vorige beschermlaagje te verwijderen. Het is niet noodzakelijk om de applicator na gebruik te reinigen.

Bescherming tijdens eten en drinken

Breng vóór de maaltijd aan om ongemak en irritatie te verlichten dat door voedsel en drank veroorzaakt kan worden.

Duur van de behandeling

Gebruik het product zo vaak als nodig is totdat de symptomen zijn verdwenen. Raadpleeg uw arts wanneer de symptomen na twee weken gebruik van het product nog aanwezig zijn.

Waarschuwingen

- Alleen aanbrengen op het mondslijmvlies.
- De applicator is voor persoonlijk gebruik.
- Zodra de gel is aangebracht, kan een licht en tijdelijk branderig gevoel ervaren worden dat na enkele ogenblikken verdwijnt.
- Voor kleine aften en wondjes gebruiken.
- Het flesje na gebruik goed afsluiten.
- Na eerste keer openen van het flesje, het product binnen 8 maanden gebruiken.
- Niet doorslikken; het per ongeluk doorslikken van kleine hoeveelheden van het product is niet schadelijk.



Tegen: pijn en branderigheid

Bevordert herstel
Beschermt tijdens eten en drinken

Suikervrij, glutenvrij,
van nature lactosevrij

- Irriterend voor de ogen.
- Contact met kleding vermijden.
- Niet gebruiken bij kinderen onder 6 jaar.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
- Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.
- Licht ontvlambaar.
- In geval van gelijktijdig gebruik met andere medicijnen, uw arts raadplegen voor de wijze van gebruik van het product.

Contra-indicaties en bijwerkingen

Het wordt aanbevolen om het product niet te gebruiken als er een bewezen overgevoeligheid voor een van de componenten is. In geval van roodheid of irritatie, het gebruik stoppen en uw huisarts raadplegen.

Niet aanbrengen op grote aften (diameter > 1 cm) of herpetiforme aften (kleine aften in grote aantallen), bloedende en/of geïnfecteerde wondjes of brandwonden.

Bewaarcondities

Bewaren op een koele, droge plaats uit de buurt van open vuur of warmtebronnen.

Ingrediënten

AQUA, ALCOHOL, AMMONIUM GLYCYRRHIZATE, AROMA, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LACTIC ACID, OLEYL ALCOHOL, PENTYLENE GLYCOL, PVP, STEVIA REBAUDIANA LEAF/STEM EXTRACT, VP-VA COPOLYMER, ZANTHOXYLUM BUNGEANUM FRUIT EXTRACT.

Verpakking

SoreFix Aften Plus Gel / Flesje van 7ml

Medisch hulpmiddel



Pasquali S.r.l.
via Dante, 7
20123 Milano, Italy

Distributeur:
Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458,
1017 CA Amsterdam, NL

Legenda



Weggooi in afvalbak



Niet gebruiken als de verpakking niet intact is



Niet blootstellen aan de zon



Let op: de waarschuwingen aandachtig lezen



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing


SoreFix®

SoreFix biedt medisch hulpmiddelen die koortslip en aften behandelen en de lippen helpen een uitbraak van koortslip te voorkomen.

SOREFIX PREVENT EN RESCUE

Sorefix heeft een unieke samenstelling op basis van zink en werkt daarom anders dan de traditionele producten. SoreFix Prevent voorkomt koortslip en verbetert de lipconditie. SoreFix Rescue verkort de duur van een koortslip en zorgt dat je er minder last van hebt.

WAT DOET SOREFIX IN ALLE FASES VAN EEN KOORTSLIP?

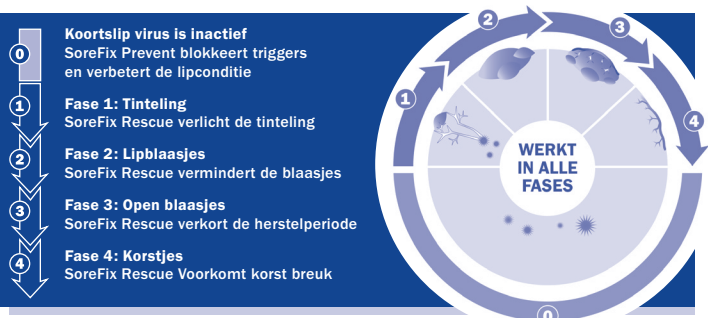

Prevent Koortslip balsem

Dagelijks

SoreFix Prevent koortslip balsem kan dagelijks gebruikt worden. Het voorkomt een koortslip doordat het een fysieke barrière vormt die de lippen beschermt tegen invloeden van buitenaf. Daarnaast bevat SoreFix Prevent een UV-filter (SPF 30). De koortslip balsem is rijk aan natuurlijke oliën en vitamine E om de conditie van de lippen te verbeteren.

- Voorkomt koortslip
- Vormt een blokkade voor koortslip triggers
- Hoge zonnefactor (SPF 30)
- Verbetert de lipconditie

SPF 30



Rescue Koortslipcrème

SoreFix Rescue koortslipcrème bevat unieke ingrediënten met een bewezen effectiviteit in alle 4 de fases van een koortslip. SoreFix Rescue koortslipcrème is een transparante crème waardoor de koortslip niet extra wordt geaccentueerd. Daarnaast is het een vette crème waardoor je lippen niet uitdrogen.

- Verkort de duur van een koortslip
- Vermindert klachten
- Verzorgt de lippen
- Bevat zink in een vette basis

Met ZINK



Active Patch

Duo Patch Koortslip patch

SoreFix Duo Patch is een ultradunne, transparante, hypoallergene patch die zich aan de lip hecht. De patch bevat hyaluronzuur die de koortslip zorgvuldig hydrateert. Hierdoor wordt het herstel van de koortslip bevorderd, de jeuk verlicht, een bescherm laag gecreëerd tegen externe invloeden en littekenvorming voorkomen.

- Bevordert wondgenezing & verlicht jeuk
- Vermindert infectierisico
- Transparant, hypoallergeen, make-up bestendig

