

## Duo Patch

### Koortslip patch met 0,5% hyaluronzuur

- Bevordert wondgenezing & verlicht jeuk
- Vermindert infectierisico
- Transparant, hypoallergeen, make-up bestendig
- 12 uur effectief

**SoreFix Duo Patch** is een ultradunne, transparante, hypoallergene patch die zich aan de lip hecht. De patch bevat hyaluronzuur die de koortslip zorgvuldig hydrateert. Hierdoor wordt het herstel van de koortslip bevorderd, de jeuk verlicht, een beschermlaag gecreëerd tegen externe invloeden, het besmettingsrisico verminderd en littekenvorming voorkomen. De patch is circa 12 uur werkzaam, niet zichtbaar en make up kan eroverheen worden aangebracht.

### Wat is een koortslip?

Een koortslip is een herpes simplex virusinfectie die als een blaasje op de lip verschijnt.

### Wat zijn de symptomen van een koortslip besmetting?

Eerste symptomen zijn een warm, prikkelend gevoel van de lip en rode vlekken. Binnen enkele uren ontstaan met vocht gevulde blaasjes. Aanleiding voor een koortslip kan zijn een verzwakt immuunsysteem, koorts, menstruatie, stress, krachtige zon of een reactie op bepaalde voedingsstoffen. Een koortslip kan altijd terugkomen omdat het virus aanwezig blijft en door voornoemde oorzaken weer geactiveerd worden.

### Waar moet u op letten bij een koortslip?

Vermijd bij een koortslip lipcontact met andere mensen tot de blaasjes volledig verdwenen zijn. Een koortslip is uiterst besmettelijk! Vermijd hele warme of hele koude levensmiddelen aangezien deze de klachten kunnen verergeren. Hoe werkt SoreFix Duo Patch? De zachte zijde van de patch is van een hypoallergene plaklaag voorzien, waarin het hyaluronzuur gelijkmatig verdeeld is. Hyaluronzuur bezit de eigenschap om grote hoeveelheden water op te slaan waardoor onder de patch een vochtige omgeving ontstaat die gedurende 12 uur de wondgenezing bevordert en jeuk verlicht. Tevens vormt de patch een barrière op de huid tegen invloeden van buitenaf, daardoor wordt het besmettingsrisico verminderd en de huid tegen littekenvorming beschermd.



### Gebruik (zie de illustraties):

Was de handen voor gebruik en zorg ervoor dat het te behandelen gebied droog en schoon is (het gebruik van crèmes of oliën belemmert de hechting van de patch op de huid).



Verwijder de patch van het bescherm papier (1, 2), verwijder de eerste helft van de patch, zonder het klevende deel van de patch met uw handen aan te raken (3, 4, 5).



Breng de patch aan op het aangedane deel en verwijder de tweede helft van de patch totdat deze volledig hecht (6).



Het is aan te raden de patch te gebruiken totdat de koortslip volledig genezen is.

### Waarschuwing:

- Kan een allergische reactie veroorzaken
- Buiten bereik van kinderen bewaren

**Inhoud:** 15 active patches

Bij ernstige incidenten dient u dit te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.

SoreFix biedt medische hulpmiddelen die koortslip en afters behandelen en de lippen helpen een uitbraak van koortslip te voorkomen.



### Een product van Serrix B.V.:

Herengracht 458  
1017 CA Amsterdam  
Nederland



### Distributeur:

Serrix Nederland B.V.  
Herengracht 458  
1017 CA Amsterdam  
Nederland



### Eurosirel SpA

Viale Europa, 30  
Cusago 20047  
Milano - Italië  
eurosirel@eurosirel.com



L214NL101

REF CFUA701420