

SoreFix®

Vaarwel koortslip, hallo glimlach



Duo Patch

Koortslip patch met 0,5% hyaluronzuur

- Bevordert wondgenezing & verlicht jeuk
- Vermindert infectierisico
- Transparant, hypoallergeen, make-up bestendig
- 12 uur effectief

SoreFix Duo Patch is een ultradunne, transparante, hypoallergene patch die zich aan de lip hecht. De patch bevat hyaluronzuur die de koortslip zorgvuldig hydrateert. Hierdoor wordt het herstel van de koortslip bevorderd, de jeuk verlicht, een beschermlaag gecreëerd tegen externe invloeden, het besmettingsrisico vermindert en littekenvorming voorkomen. De patch is circa 12 uur werkzaam, niet zichtbaar en make up kan eroverheen worden aangebracht.

Wat is herpes labialis?

Herpes labialis is een herpes simplex virus-infectie die als een blaasje op de lip verschijnt. Deze gevulde blaasjes worden een koortslip genoemd.

Wat zijn de symptomen van een herpes labialis besmetting?

Eerste symptomen zijn een warm, prikkelend gevoel van de lip en rode vlekken. Binnen enkele uren ontstaan met vocht gevulde blaasjes. Aanleiding voor een koortslip kan zijn een verzwakt immuunsysteem, koorts, menstruatie, stress, krachtige zon of een reactie op bepaalde voedingsstoffen. Een koortslip kan altijd terugkomen omdat het virus aanwezig blijft en door voornoemde oorzaken weer geactiveerd worden.

Waar moet u op letten bij herpes labialis?

Vermijd bij een koortslip lipcontact met andere mensen tot de blaasjes volledig verdwenen zijn. Herpes labialis is uiterst besmettelijk! Vermijd hele warme of hele koude levensmiddelen aangezien deze de klachten kunnen verergeren.

Hoe werkt SoreFix Duo patch?

De zachte zijde van de patch is van een hypoallergene plaklaag voorzien, waarin het hyaluronzuur gelijkmatig verdeeld is.

Hyaluronzuur bezit de eigenschap om grote hoeveelheden water op te slaan waardoor onder de patch een vochtige omgeving ontstaat die gedurende 12 uur de wondgenezing bevordert en jeuk verlicht. Tevens vormt de patch een barrière op de huid tegen invloeden van buitenaf, daardoor wordt het besmettingsrisico verminderd en de huid tegen littekenvorming beschermd.



Gebruik (zie de illustraties):

Was de handen voor gebruik van de patch en zorg ervoor dat de huid schoon en droog is. Open de verpakking **1**, pak de applicator aan de overzijde van de patch tussen duim en wijsvinger **2** en neem nu de applicator met patch uit de verpakking **3**. Plaats eerst de helft van de patch op de koortslip **4** om daarna met de andere helft de volledige koortslip te bedekken **5**. Eventueel kan nu make-up en lippenstift over de patch worden aangebracht. Herhaal de behandeling tot de koortslip volledig verdwenen is. Voor éénmalig gebruik.



Waarschuwing:

- Kan een allergische reactie veroorzaken
- Buiten bereik van kinderen bewaren

Inhoud: 15 active patches

SoreFix biedt producten die koortslip en aften behandelen en de lippen helpen een uitbraak van koortslip te voorkomen. Vaarwel koortslip, hallo glimlach.



Ga voor meer informatie naar www.sorefix.nl

(NL) Distributeur Serrix Nederland B.V.

(BE) Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Eurosirel SpA
Viale Europa, 30
Cusago 20047
Milano – Italië

CE
0051

L214NL100

