

Prevent koortslip balsem voor het voorkomen van een koortslip



SoreFix Prevent koortslip balsem kan dagelijks gebruikt worden. Het voorkomt een koortslip doordat het een fysieke barrière vormt die de lippen beschermt tegen invloeden van buitenaf (zie koortslip triggers in figuur "Werkt in alle fases"). SoreFix Prevent bevat een UV-filter (SPF 30) waarmee koortslip uitbraken, veroorzaakt door UV-licht, voorkomen worden. De koortslip balsem verbetert de conditie van de lippen.

Dosering en gebruik

Ter voorkoming van een koortslip brengt u SoreFix Prevent koortslip balsem dagelijks 3 tot 6 maal aan op de gehele lip, wanneer u blootgesteld bent aan één van de triggers. Het wordt aanbevolen uw handen te wassen voor het aanbrengen van de balsem. Bij gebruik van lipstick wordt geadviseerd om SoreFix Prevent koortslip balsem minimaal 15 minuten van tevoren aan te brengen.


SoreFix Prevent koortslip balsem is vrij van sulfaten, vrije polyethyleen glycolen, TEA's, DEA's, parabenen en andere conserveringsmiddelen.

Voorzorgsmaatregelen:

- Uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik op en rond de lippen.
- Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één of meer van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer irritatie of een allergische reactie optreedt. Indien de symptomen aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.
- Gebruik tijdens de zwangerschap alleen na aanbeveling en onder begeleiding van een arts.
- Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.
- Het wordt aanbevolen om het gebruik gedurende 2 dagen te onderbreken na 30 dagen van continu gebruik.

Als zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het product, meld dit dan bij de fabrikant vermeld op de bijsluiters en de bevoegde autoriteit in uw land.

WAT DOET SOREFIX IN ALLE FASES VAN EEN KOORTSLIP?

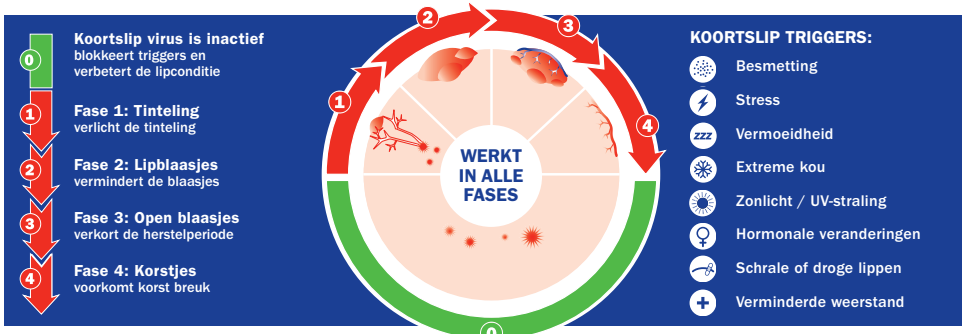

Ingrediënten:

Jojoba oil (56%), PEG-8 beeswax, ethylhexyl methoxycinnamate (8%), octocrylene (6%), hydrogenated styrene/isoprene copolymer, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (3%), zinc oxide (2.2%), zinc ricinoleate, parfum, aluminum starch octenylsuccinate, tocopheryl acetate, butyrospermum parkii (shea) butter, hydrogenated styrene/butadiene copolymer, pomegranate oil, triethoxycaprylylsilane.

LOT Lot nummer en vervaldatum: zie doosje en potje
Na gebruik kunnen het potje, de bijsluiters en het doosje met het normale huisafval worden weggedaan. Houd rekening met het milieu en zorg voor afscheiding.

1P Per persoon, meervoudig gebruik

MD Medisch Hulpmiddel

☀ Houd potje uit de buurt van zonlicht.

15°C - 25°C
Buiten bereik van kinderen houden.

Ook beschikbaar:

- SoreFix Rescue koortslipcrème
- SoreFix Duo Patch



Distributeur
Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Fabrikant
Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland



1639
L034NL100